

DEMECAL

取り扱い説明書

使用上の注意

本製品を安全に、正しくご利用いただくために、
内容を必ずお読みになり、よく理解してからご使用ください。

発売元：株式会社リージャー 〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町2-26-5-3F

TV-AH001-16

【商品のお取り扱いに関して】のお問い合わせ

 **0120-100-302**
コールセンターまで

【その他】のお問い合わせ

検査申込書の右上にある
お問い合わせ先まで

取り扱い説明が動画でご覧頂けます
<http://www.leisure.co.jp>

- 右の4つの囲み内容を読み、特に「警告」「注意」の記載事項は絶対に守ってください。
- 裏面にある器具のセット内容を確認し、用途を理解してください。
- 裏面の手順を一通り読んでから作業を始めてください。

採血と血しょう分離は、たいへんデリケートな作業です。
取り扱い方を誤ると、正しい検査結果が得られない場合があります。
説明書の注意事項は必ず守ってください。

血糖や中性脂肪は、 食事の影響を受けます。

食事をすると血糖や中性脂肪の検査結果に影響する場合があるため、採血は空腹時に行うことが基本といわれています。

血液はそのときの状態を反映しますので、ご利用の際は目的に応じて、採血してください。

※血糖や中性脂肪の検査を含む主な対象商品
「生活習慣病+糖尿病」「メタボリックシンドローム&生活習慣病」「ビューティカル」など

警告

- 次の方は絶対に使用しないでください。
 - ・止血能力の低下している方
 - ・アレルギーショックのある方
 - （アルコール消毒に対してアレルギー症状のある方）
 - ・アルコール摂取直後の方
- 採血は本人、または本人の同意を得てから行ってください。
- 次の行為を感染症予防のために必ず実施してください。
 - ・採血は、手を洗って清潔にし、採取部位を必ず消毒し、清潔なテーブルの上で行ってください。
 - ・複数人で本製品を使い回さないでください。
 - ・繰り返しの使用、使用後の再使用はしないでください。
 - ・採血後は、必ず絆創膏で処置をしてください。
 - ・本製品以外で採血することは絶対におやめください。
- 採血後の本製品は使用、未使用に関わらず、元のトレイに入れてご返送ください。
医療ゴミとして処理いたしますので、家庭ゴミとして廃棄しないでください。

注意

- 本製品は採血目的以外には使用しないでください。
- 指先以外で採血しないでください。
- 本製品の分解をしないでください。
- お子様の手の届かない所に保管してください。
- 薬剤が目や口に入らないようにしてください。
誤って入ってしまった場合は、直ちに大量の水で洗い流し、
必要があれば医師の診察を受けてください。
- 出血が止まらない場合は医師の診察を受けてください。
- 人以外（動物等）には使用しないでください。
- 過去に血を見て気分が悪くなった経験がある方は、使用を中止するか、または、お一人で行うことを避けてください。

お願い

- 次の項目は正しい検査を行い、正確な検査精度を得るために必ずお守りください。
- 本製品を保管する場合は、直射日光、高温、多湿、凍結する場所は避け、室内で保管してください。
- 採血は空腹時に行うことを基本としてください。
- 体調を崩している、または体に不調感がある場合は、日を改めて採血してください。
- トレイに記載されている使用期限内に使用してください。
- 採血後は、本セットを温度の高いところに置かないでください。
- 採血後の製品は、当日中に返送の手続きをしてください。
- 本製品の使用に関し不安がある場合や、不都合を感じた場合は、ご使用前に検査申込書に明記されているお問い合わせ先まで、ご連絡ください。

ご了承ください

- 次の場合、再度検査をお願いする場合があります。
- 採血後の製品の取り扱いには万全を期しておりますが、不測の事態により検査結果が得られない場合。
- 採血量や血しょう分離の不適正により、結果が得られない場合。
- ごくまれに、体質により本製品では血液検査が困難な場合があります。
- 本サービスは、検査と検査結果のみを通知するもので、病態を診断するものではありません。
- 検査結果は、あくまでも個人の責任において、自己の健康管理に役立てていただくものです。もし体調不良、健康不安がある場合は最寄りの医療機関にご相談ください。
- 器具は、研究開発により若干変更される場合があります。
- 汗の混入により結果に影響がある場合があります。

よくあるご質問 Q & A


Q 溶液をこぼしてしまった、ボトルにチップを落とす前にシリンダーを入れた…など器具の操作を失敗した場合

A 検査申込書に記載事項をもれなくご記入いただき、失敗してしまった旨を検査申込書に記入の上、ご返送ください。




Q 密閉キャップ（緑）が最後まで閉まらない…

A シリンダーがボトルの底までついていない場合、密閉キャップは完全に閉まりません。検査申込書に記載事項をもれなくご記入いただき、失敗してしまった旨を検査申込書に記入の上、ご返送ください。

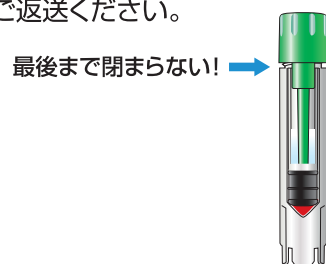


Q 血液を分離したら赤くなってしまった…

A 度合いにもよりますが、検査できる場合があります。自己判断せずにそのまま検査センターへ送ってください。

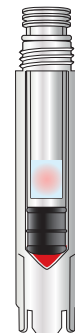

Q 説明書の通りにランセットを使用したか、出血が少なかった…

A 再度、手の血行をよくした上で、予備のランセットにて採血してください。予備のランセットも使い切ってしまった場合は、検査申込書に記載のお問い合わせ先までご連絡ください。

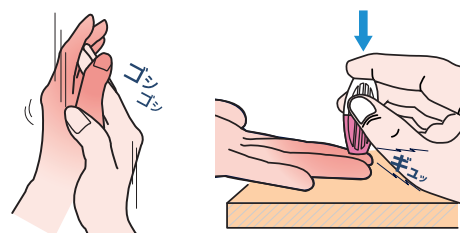


Q 採血は空腹時に行うことが基本と書いてありますが、コーヒーや紅茶等は飲んでもいいのですか？

A 多少の水分はかまいませんが、糖分の入った飲料は、血糖値など検査項目により数値に影響が出た場合があります。

Q ランセットって痛くありませんか？

A ランセットは安全のため、1度しか使えません。押すと針が出てすぐに本体に戻る仕組みです。一瞬、軽く刺すだけなのでほとんど痛くありません。キズも微小なので、指先に向け血液を押し出すような動作が必要となります。

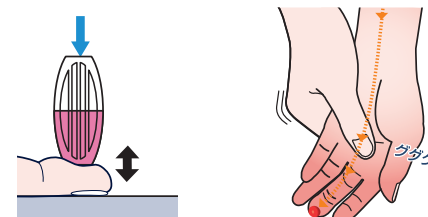

Q 血液は固まりやすいんですか？

A 止血の作用がヒトにはあります。この採血でも同じで、すぐに血液は固まり始めます。はじめに器具をキッチリと並べておき、取り扱い説明書を一通りよく読み、手順を理解してください。途中で時間をかけすぎるとキズがふさがってしまいます。

Q 血液量が重要な理由は？

A 血液量は、正しい検査数値を出すために重要です。微量の血液で分析できるデメカル血液検査セットですが、血液量が少なすぎると検査不能となってしまいます。必ず吸引チップの上までムラ無く赤くなるまで採血してください。

